

Cardiotocographe Edan F2



Gyneshop.fr

PRÉSENTATION

2

Le cardiotocographe gémellaire F2 représente le modèle économique de la gamme obstétrique du fabricant Edan. Il se différencie de l'Edan F3 par son écran LCD noir et blanc et l'absence de port USB. Tout aussi léger et fiable, il saura s'adapter à vos besoins grâce aux différents accessoires disponibles !

Pourquoi choisir ce modèle ?


- + Légèreté (moins de 4 Kg)
- + Dimensions ultra compactes
- + Large écran LCD

- + De nombreux accessoires
- + VCT (en option)




ASPECT GLOBAL

3

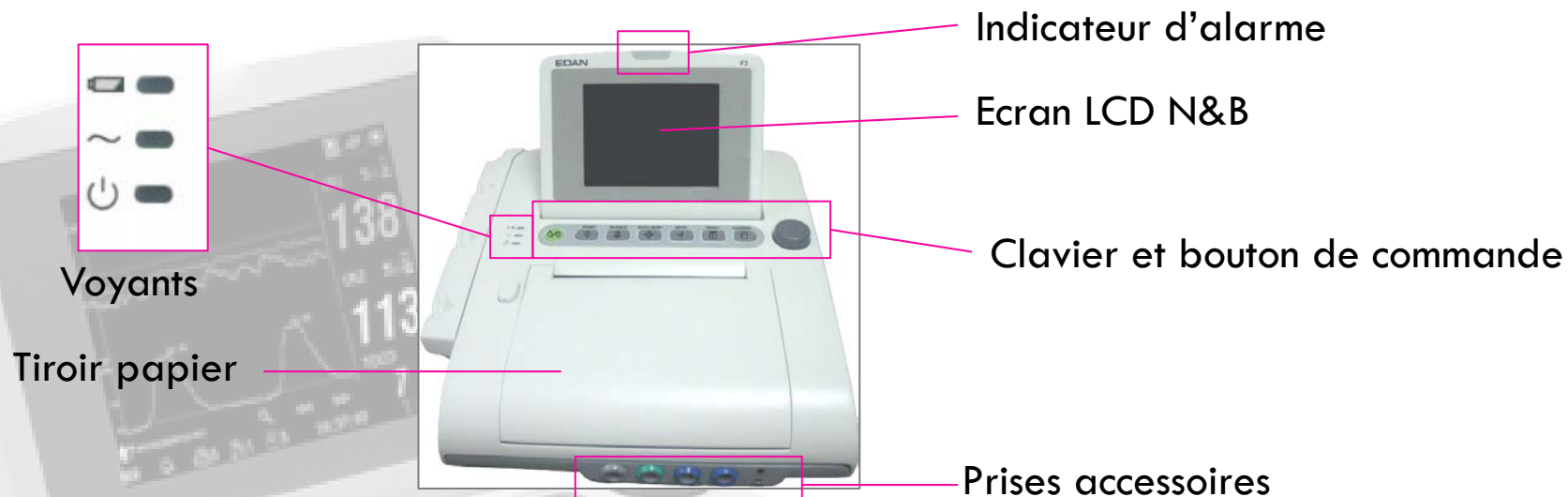


AU DOS :

- Interface DB9 et RJ45
- Poignée de transport
- Prise
- Terminal de mise à la terre

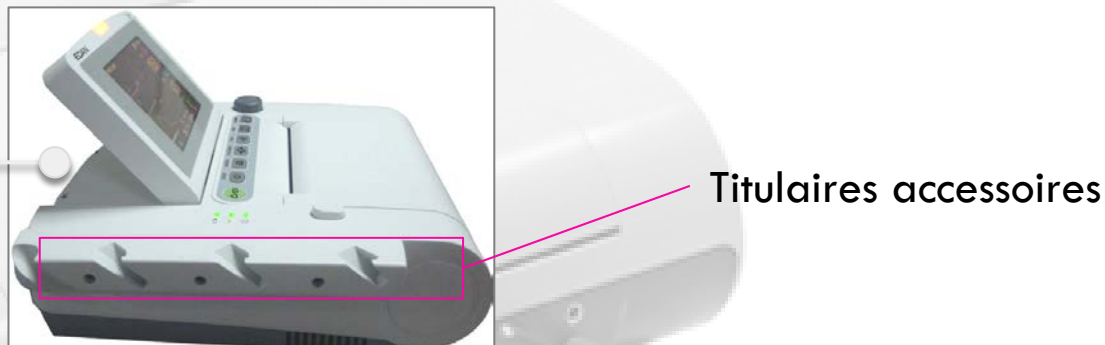

CLAVIER


4

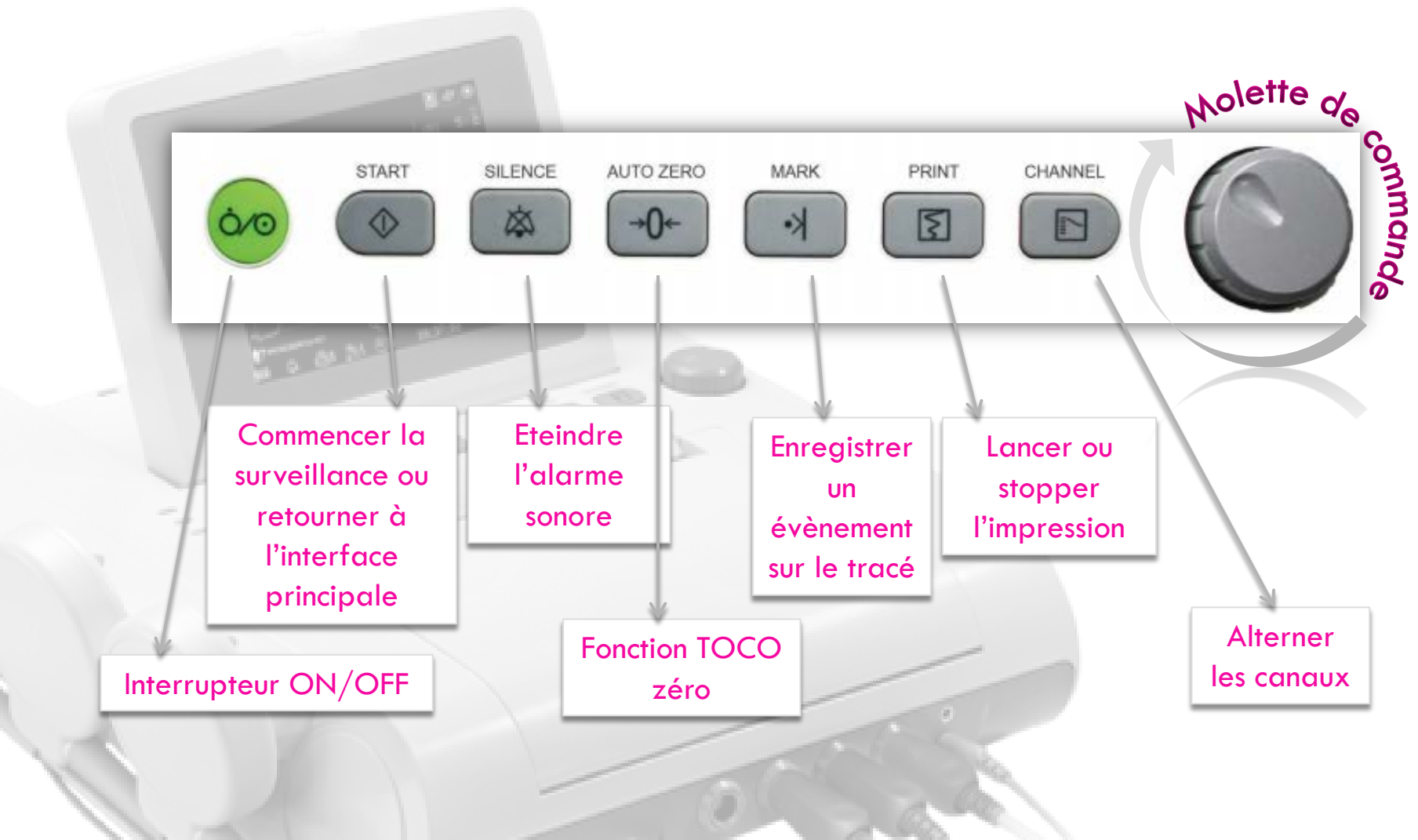


MODES D'AFFICHAGE

5


Sélectionnez parmi 3 modes d'affichage, celui qui convient le mieux à l'examen clinique réalisé, grâce à une touche dédiée (↔).

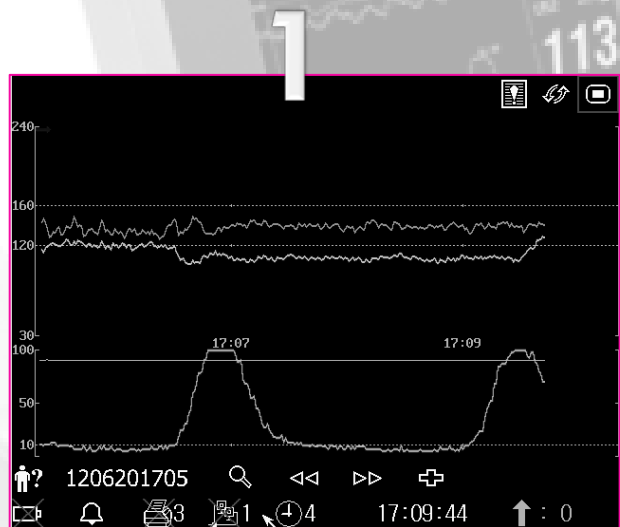

Tracés

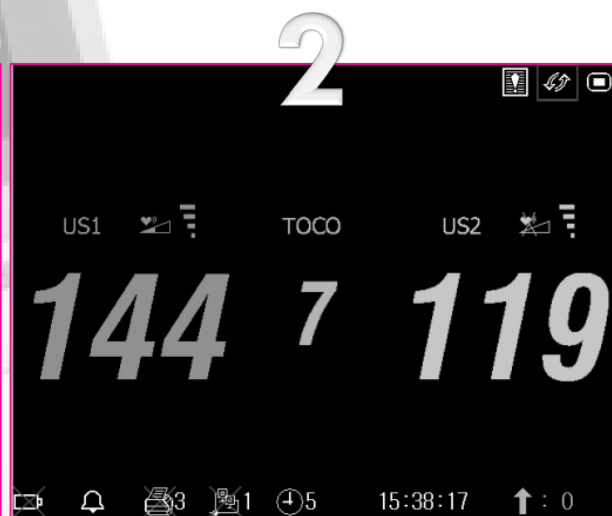

Valeurs

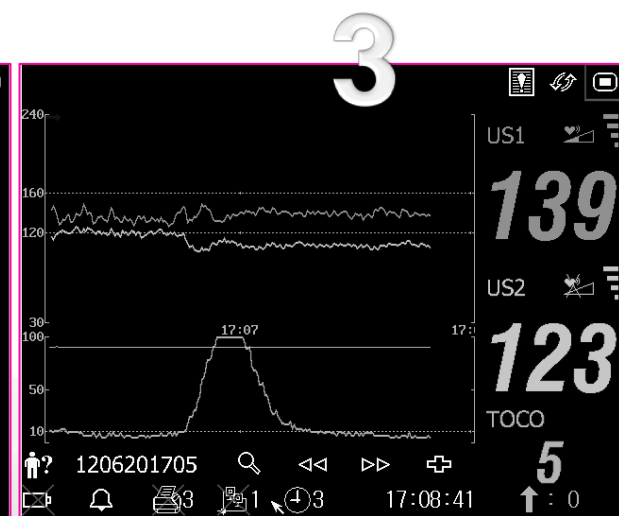

Tracés + valeurs

ENREGISTREMENT

6

Les tracés sont enregistrés directement sur la mémoire interne de l'appareil pour pouvoir être revisualisés sur l'écran du moniteur.


Pour rechercher un enregistrement stocké dans la mémoire, utilisez la touche . Vous pourrez ainsi consulter les derniers enregistrements (avec date, ID et nom de la patiente)




Jusqu' à
60H
visualisables

IMPRESSION

7

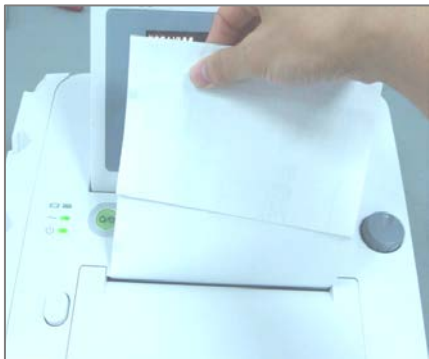

- **Vitesse au choix** : 1 cm/min, 2 cm/min ou 3 cm/min (par défaut)
- **Impression automatique pendant l'enregistrement** (paramétrable)
- **Impression rapide des enregistrements sauvegardés**
- **Mode autotest**

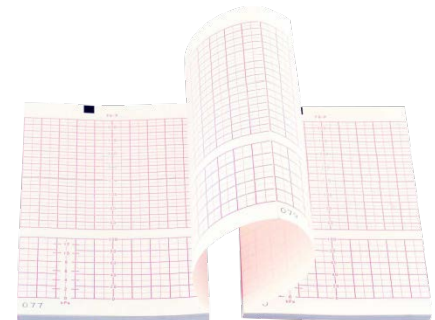

LOGICIEL INSIGHT

EXPORT DES DONNÉES SUR PC

8

Il est possible d'exporter les données selon une procédure simple et rapide. Les enregistrements sont alors visibles sur PC grâce au logiciel INSIGHT, livré avec l'appareil. Le logiciel permet la visualisation, l'annotation et l'enregistrement sous format PDF.

