



GIMA

Test Monofase di Ovulazione Strisce (Urina)

One Step Ovulation Test Strip (Urine)

1 Etape Test d'Ovulation sur Bandelette (Urine)

Einstufen Ovulation Teststreifen (Urin)

Prueba de Ovulación en Un Solo Paso en Tira (Orina)

Teste de Ovulação Em Um Só Passo Em Tira (Urina)

Τεστ Ωορρηξίας Ταινίας Ενός Σταδίου (Ούρων)

**MANUALE D'USO
OPERATOR'S MANUAL
MANUEL D'UTILIZATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USO
MANUAL DE USO
Εγχειρίδιο χρήσης**

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.





COMPOSANTS

Matériel fourni

- Bandelettes
- Mode d'emploi

Matériel nécessaire non fourni

- Récipient pour prélèvement d'échantillon
- Chronomètre

QUAND COMMENCER LE TEST

D'abord, déterminer la durée du cycle menstruel de l'individu. C'est le nombre de jours à compter du premier jour des règles (écoulement sanguin) jusqu'au dernier jour avant le début des règles suivantes. Ensuite, déterminer le nombre de jours après les règles pour commencer le test. Trouver la durée du cycle menstruel dans la première rangée du tableau ci-dessous, et lire le nombre correspondant dans la deuxième rangée. C'est le nombre de jours après les règles pour commencer le test.

Durée du Cycle Menstruel

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Jours à compter

Finalement, déterminer le jour pour commencer le test. En commençant par et en incluant le premier jour des dernières règles, compter le nombre de jours indiqués dans l'étape précédente. On trouve donc le jour où le test doit commencer. Il est recommandé de tester une fois par jour pendant cinq jours.

Note: En cas de doute de la durée du cycle menstruel, utiliser la durée la plus courte (21 jours) dans le tableau. Il serait alors sans doute nécessaire de tester pendant plus de 5 jours.

Exemple: la durée normale du cycle menstruel de l'individu est de 28 jours. Le tableau indique qu'il faut compter 11 jours à partir des dernières règles. Les règles ont commencé le 3 du mois. Compter 11 jours en incluant la date du 3 pour arriver à la date du 13. Le prélèvement des urines doit commencer le 13 et continuer jusqu'au 17. (Voir l'Exemple du Calendrier pour l'échantillon ci-dessous).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31				

☐ Premier jour des règles

☐ Commencer le test avec la Bandelette "Test d'Ovulation" (Urine) LH l Etape

PROCEDURE

Laisser revenir la bandelette, l'échantillon d'urine et/ou les contrôles à température ambiante (15-30°C) avant d'effectuer le test.


1. Déterminer le jour pour commencer le test (Voir le paragraphe ci-dessus "QUAND COMMENCER LE TEST")

2. Laisser la pochette ou le flacon revenir à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirer la bandelette de sa pochette ou son flacon et l'utiliser rapidement.

NOTE: Pour l'emballage du flacon, bien refermer le flacon après en avoir retiré le nombre de bandelettes nécessaire. Inscrire la date de première ouverture sur le flacon. Une fois le flacon est ouvert, les bandelettes restantes sont stables pendant 90 jours.

3. Avec les flèches pointant vers l'échantillon d'urine, **immerger la bandelette verticalement dans l'échantillon d'urine pendant au moins 10-15 secondes.** Ne pas dépasser la ligne maximale (MAX) sur la bandelette. Voir illustration ci-dessous.

4. Placer la bandelette sur une surface non absorbante, déclencher le chronomètre et attendre que la ligne rouge apparaisse. Le résultat doit être **lu dans les 5 minutes.** Ne pas lire le résultat après 10 minutes.

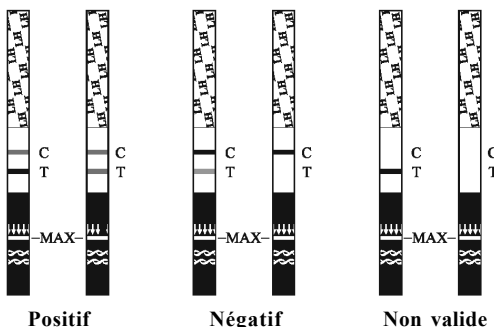

INTERPRETATION DES RESULTATS

(Conformément illustration ci-dessus)

POSITIF: si les deux lignes sont visibles et la ligne dans la zone de test (T) est la même ou plus foncée que celle dans la zone de contrôle (C). Ceci indique que l'ovulation est probable dans les 24-36 heures.

NEGATIF: Si les deux lignes sont visibles, mais la ligne dans la zone de test (T) est plus claire que celle dans la zone de contrôle (C), ou s'il n'y a pas de ligne dans la zone de test (T). Ceci indique qu'aucune augmentation de LH n'a été détectée.

NON VALIDE: La ligne de contrôle n'apparaît pas. Un volume d'échantillon insuffisant ou une manipulation incorrecte du test en sont les causes probables. Relire les instructions et refaire le test avec une nouvelle bandelette. Si le problème persiste, cesser toute utilisation du kit immédiatement et contacter votre distributeur local.

CONTROLE QUALITE

Le test inclut un système de contrôle interne représenté par la ligne rouge apparaissant dans la zone de contrôle (C). Cette ligne confirme que le test a été fait correctement avec un volume d'échantillon suffisant. Un résultat positif indique que l'échantillon d'urine contient le niveau de LH indiquant le début de l'ovulation. L'ovulation devrait commencer dans les 24-36 heures.

Un résultat négatif indique qu'aucune augmentation de LH n'a été détectée et le test quotidien doit continuer. Toutes les femmes n'ovulent pas en milieu de cycle, par conséquent, un résultat positif peut ne pas apparaître pendant les jours du test. Si aucun résultat positif n'apparaît, continuer le test avec la Bandelette "Test d'Ovulation" (Urine) LH 1 Etape pendant plusieurs jours. Si les résultats négatifs persistent, recommencer le test pendant le cycle menstruel prochain.

LIMITES

1. Pour diagnostic *in vitro* à usage professionnel uniquement.
2. Ce test ne peut pas être utilisé comme moyen contraceptif.
3. Les résultats du test ne devraient pas être affectés par les analgésiques, antibiotiques ou autres drogues d'usage commun. Les médicaments contenant des hCG ou LH peuvent affecter le test et ne doivent pas être consommés pendant l'utilisation de la Bandelette "Test d'Ovulation" (Urine) LH 1 Etape. De plus, le test ne fonctionnera pas correctement pour les femmes enceintes, en ménopause ou qui prennent des pilules contraceptives.
4. Tenir à l'écart des enfants.

PERFORMANCE

Des études de laboratoire montrent que la sensibilité de la Bandelette Test d'Ovulation LH 1 Etape (Urine) est de 30 mUI/ml et la précision est de 99,0%.

INTERFERENCES

La Bandelette "Test d'Ovulation" (Urine) LH 1 Etape a été testé avec des drogues d'usage commun et des hormones y compris FSH (700 mUI/ml), TSH (500 µUI/ml) et hCG (1.000 mUI/ml). Aux niveaux testés, aucune de ces substances n'interfère avec les résultats attendus.



QUESTIONS ET REPONSES

1. La Bandelette “Test d’Ovulation” (Urine) LH 1 Etape peut-elle être utilisée pour éviter de tomber enceinte?

Non, le test ne doit pas être utilisé comme moyen contraceptif.

2. L’alcool ou autres médicaments d’usage commun peuvent-ils affecter le test?

Non, mais il est recommandé de consulter un médecin en cas de prise de médicaments hormonaux. De même que l’utilisation récente des moyens contraceptifs oraux, l’allaitement ou la grossesse peuvent affecter les résultats.

3. Combien de temps les lignes restent-elles visibles?

Pour avoir un résultat optimal, le test doit être lu dans les 5 minutes. Un résultat positif (augmentation) ne disparaîtra jamais. Les lignes colorées peuvent devenir plus foncées et un fond teinté peut apparaître après quelques heures. Certains résultats négatifs peuvent provoquer plus tard une seconde ligne colorée floue due à l’évaporation de la zone de test, ce qui empêche la migration des substances chimiques. Ne pas lire le résultat après 10 minutes et jeter la bandelette après lecture.

4. Une fois que le résultat positif est obtenu, quel est le meilleur moment pour avoir des rapports sexuels?

L’ovulation devrait avoir lieu dans les 24-36 heures. C’est donc la période la plus féconde. Il est conseillé d’avoir des rapports sexuels dans ce laps de temps.

5. Ce test remplace-t-il la méthode de prise de température du corps (BBT)?

Le changement de la température du corps indique principalement que l’ovulation a déjà eu lieu.

La Bandelette “Test d’Ovulation” (Urine) LH 1 Etape indique que l’ovulation va avoir lieu.

6. Un résultat positif garantit-il une grossesse après avoir des rapports sexuels durant les jours de fécondité?

Plusieurs facteurs peuvent affecter la possibilité de tomber enceinte. Il est souvent nécessaire d’utiliser le kit pendant 3-4 mois avant de tomber enceinte. Il est conseillé de consulter un médecin si la grossesse n’a pas lieu après 3-4 mois.

7. Quand la grossesse peut-elle être confirmée?

Les test rapides de grossesse peuvent donner des résultats dès la première absence des règles.

8. A quelle heure de la journée le test doit-il être effectué? Le premier prélèvement matinal d’urine doit-il être utilisé?

Les premières urines du matin ne sont pas recommandées, mais n’importe quel autre moment de la journée convient. Pour des résultats optimaux, essayer de prélever les urines tous les jours à peu près à la même heure.

9. Une consommation importante de liquides peut-elle affecter le résultat?

Une consommation importante de liquides avant le test peut diluer les hormones dans l’urine. Il est suggéré de limiter la consommation de liquide deux heures avant le prélèvement des urines.

Liste des Symboles

	Attention, voir mode d’emploi
	Pour diagnostic <i>in vitro</i> uniquement
	Conserver entre 2-30°C

	Tests par coffret
	Péremption
	No. de lot

	Fabricant
	Usage unique
	Code produit 29113