

GUIDE RAPIDE D'INSTALLATION

Pour ECG Edan Numérique sans fil avec interprétation **et tablette tactile Android**

1. Allumez votre tablette, allez dans Réglages - Sécurité - Gestion de l'appareil - Sources inconnues - Autoriser

2. Brancher la tablette au PC et transférer le fichier .Apk présent dans le CD fourni dans un répertoire au choix de la tablette

3. Depuis la tablette, lancez un explorateur de fichier et exécutez le fichier .Apk pour installer le logiciel

4. lancer l'application PADECG

5. Mot de passe Application :125863 - Puis login : ECG - Mot de passe : ECG

6. Retournez sur la page d'accueil de la tablette et allez dans réglages pour activer le bluetooth et Rendre identifiable la tablette

7. lancez l'application ECGPAD sur la tablette

8. Cliquez sur ECG STAT dans l'application, vous verrez apparaitre Rech. Dispositif Bluetooth.

9. Allumez le boitier ECG (bouton extreme droite), allez dans le menu (bouton extreme gauche, descendre jusqu'à Corresp. dispositif et valider) il doit y avoir écrit demande...

10. Le nom de la tablette doit apparaitre sur le boitier ECG, validez.

11. L'application sur la tablette doit maintenant vous demander un code PIN, rentrez 12345678.

***Voilà l'ECG et la tablette sont maintenant connectés,
cette opération n'est plus à refaire !***