


Pairing (jumelage appareil/ordinateur)

Pour que 2 appareils fonctionnent en Bluetooth, il est nécessaire que ceux-ci se reconnaissent, c'est ce qu'on appelle le Pairing (ou jumelage). Merci de refaire la procédure de jumelage suivante :

1. Dans le menu, allez dans « **Configuration** » puis dans « **Interfaces avec les moniteurs** »



2. Sélectionnez ensuite l'onglet **Bluetooth**.

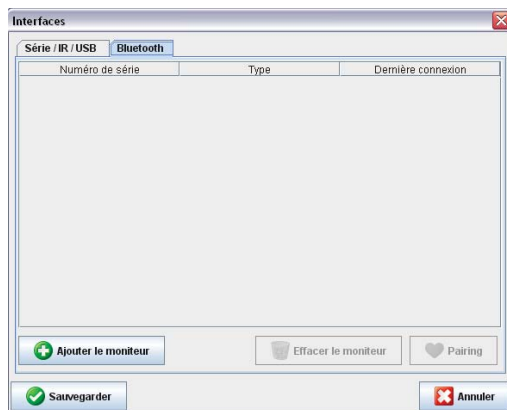

Cliquez sur



Le message suivant s'affiche :

Allumez le Mobil-O-Graph et passez en **mode PAIr**.

3. Pour passer en mode **PAIr**

a) Prenez le moniteur Mobil-O-Graph® en mains et appuyez sur la touche  pour le mettre en marche. L'heure s'affiche.

b) **[1]** Tout en maintenant la touche  appuyée


[2] appuyez sur la touche  (Bt clignote)

[3] Puis appuyez 2 fois sur la touche  jusqu'à ce que les lettres **PAIr** clignotent à l'écran.

[4] Appuyez sur la touche  pour confirmer. Les lettres PAIr ne clignotent plus et un **signal sonore** est émis.

4. Revenez à l'ordinateur

a) Cliquez sur **OK** dans la fenêtre de dialogue.

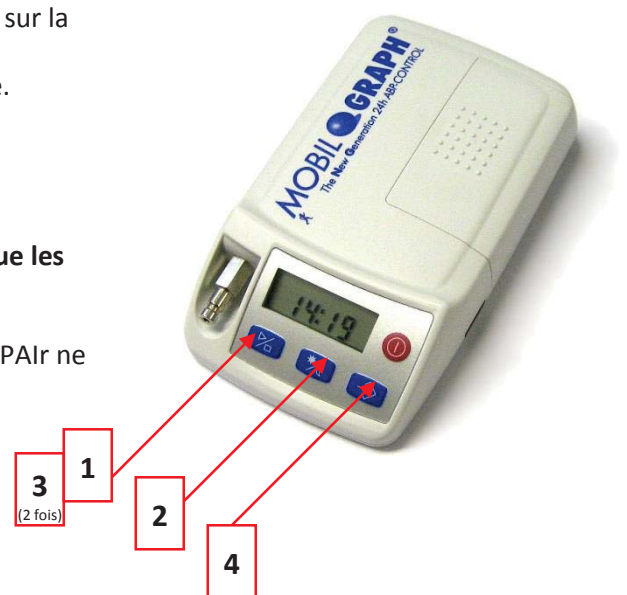

- b) La fenêtre « Recherche Bluetooth du moniteur » s'ouvre. Cliquez sur « **Chercher** ».
Un n° de série s'affiche dans la fenêtre (C + série de chiffres), vérifiez qu'il correspond à celui qui est inscrit au dos de votre Mobil-O-Graph®. Sélectionnez le numéro et cliquez sur 

Un message de confirmation s'affiche et un **bip** est émis par le moniteur.

Attention : il est possible que votre système d'exploitation vous demande un code de jumelage, entrez alors le code : 6624

Veillez cliquer sur **OK** dans la fenêtre de confirmation, puis sur 

- c) Si aucun numéro ne s'affiche dans la liste (ou qu'aucun ne correspond au numéro de série de votre appareil), veuillez cliquer à nouveau sur « **Chercher** ». **Vous pouvez être amené à cliquer plusieurs fois sur « Chercher »**. Réitérer l'opération jusqu'à ce qu'apparaisse le n° de série de l'appareil.



En cas de problème lors de la manipulation, n'hésitez pas à nous contacter au 01 48 03 88 88.

Si vous utilisez Teamviewer, merci de vous munir de vos identifiants ID et mot de passe afin que nous puissions prendre la main sur votre ordinateur.