
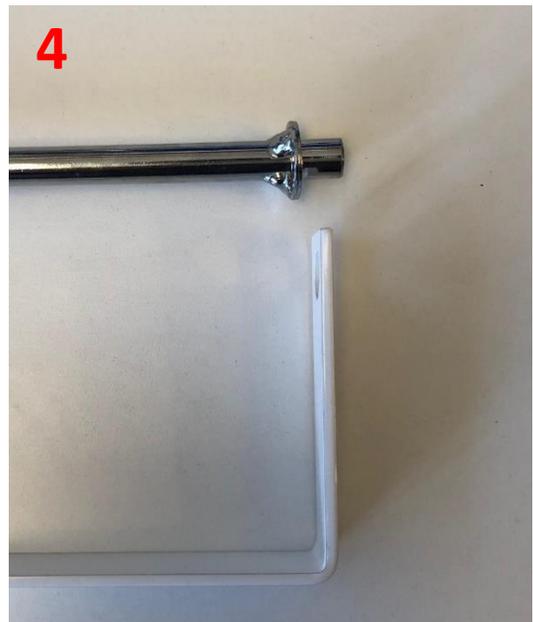
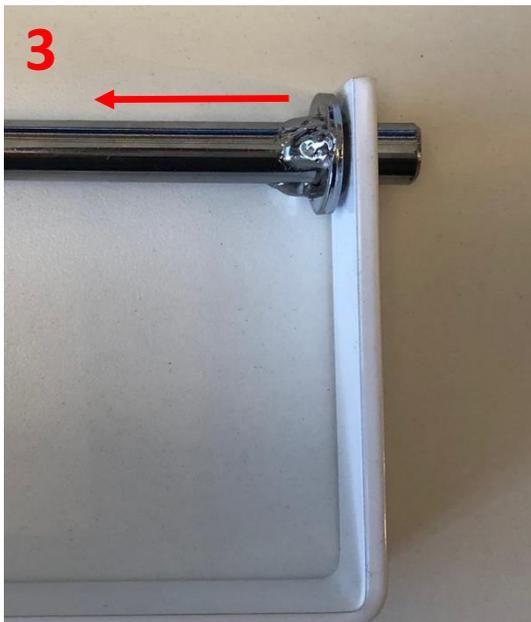


# PLACER LE PORTE-ROULEAU SUR FAUTEUIL

Devisser l'écrou A (photos 1 et 2) .

Sortir la barre chromée en faisant pression (photos 3 et 4).

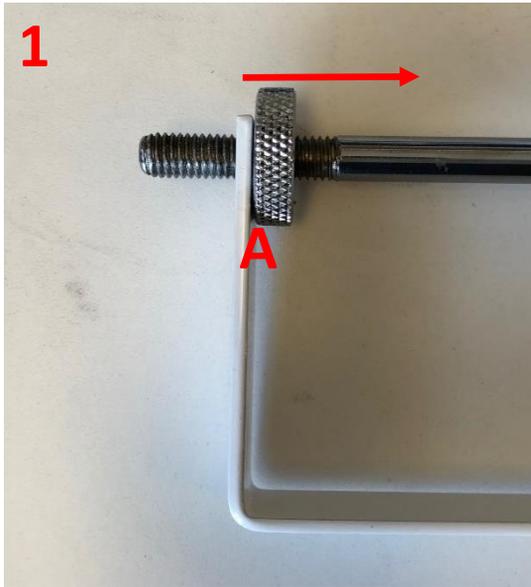

## **FIXER LE PORTE-ROULEAU DERRIERE LE DOSSIER**

**Los trous du porte-rouleau (A et B) correspondent à la largeur du chassis.**

**Placer les vis autoforeuses et visser directement le porte-rouleau avec un tournevis sans fil.**

**Remettre la barre chromée pour refermer le porte-rouleau.**



