



Fiche technique et de sécurité
Mètre ruban
REF. 44 447 10 / 44 447 10N
TCE3 - Non dispositif médical

Création : 09.03.2010
Mise à jour : 27.10.2016
Indice de révision : b

Page 1 / 1

<i>Description générale</i>	Ruban de mesure avec système d'enroulement de retour automatique par pression sur le bouton. Longueur 200 cm ou 80 pouces.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Code ACL</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	A la main avec un produit n'attaquant pas l'ABS
<i>Substance(s) impropre(s)</i>	Produit attaquant l'ABS	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Boîtier et ruban
<i>Matières</i>	Boîtier en ABS et ruban en plastique souple	
<i>Etiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	Individuel en sachet plastique et boîte de 20 pièces
<i>Stockage particulier</i>	Oui	A température ambiante dans un endroit propre et sec
<i>Durée d'utilisation</i>	Temporaire	
<i>Marquage sur l'article</i>	Logo COMED	Non
<i>Références + extensions</i>	44 447 10	44 447 10N
<i>Désignation</i>	Mètre ruban	
<i>Dimensions Lo x La x H (mm)+- 3mm</i>	Boîtier = Ø51 x 13.5 Ruban = 2000 x 8 x 0.5	
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	29	
<i>Couleurs</i>	Blanc	
<i>Résistance température (°C)</i>	-10 à 45°C	
<i>Utilisation</i>	Dispositif utilisé pour mesurer des parties du corps humain.	
<i>Mode d'emploi</i>	Tenir le boîtier fermement dans une main puis dérouler le ruban en tirant doucement sur la languette qui dépasse. Une fois la mesure effectuée, enrouler le ruban dans le boîtier en appuyant sur le bouton au centre du boîtier. Pour un bon enroulage, veiller à ce que le ruban ne soit pas entortillé.	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Nettoyer ou désinfecter après chaque contact avec un patient.	
<i>Recyclage</i>	Non	
<i>Récupération</i>	Dans les bacs de déchets communs	
<i>Latex/Antistatique</i>	NC/Non	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/NC	
<i>Phtalates/PVC</i>	Non/Non	
<i>RoHs</i>	NC	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul	Combinaisons de phrases = Nul

Rédacteur : Marion KLEIN
Fonction : AQ
Paraphe : MK

COMED SAS
8 rue Louise Michel
67200 STRASBOURG - France
www.comed.fr