

# LES MASQUES MATOPAT

SURGIMASK

**TZMO**  
**France**

SASU

member of  TZMO GROUP



- **Fabriqués en UE**
- masque médical 3 plis
- **2 élastiques résistant en non tissé large pour le confort des oreilles**
- barrette nasale
- non tissé non allergène
- l'efficacité de filtration bactérienne (BFE ≥ 98%)
- **type II selon PN-EN 14683:2019**



# UTILISATION

## Mode d'emploi

Le masque a deux élastiques avec le mot "open" pour la fixation sur les oreilles.

- pointer le masque vers le visage avec le côté équipé des élastiques de sorte que la barrette réglable soit en haut,
- étendre les deux élastiques avec le mot "open" en les tirant vers le haut dans le sens imprimé,
- mettre le masque sur votre visage en le tenant et en fixant les élastiques sur vos oreilles,
- ajuster la barrette nasale au contour de votre nez,
- ajuster le masque à votre visage afin qu'il couvre bien le nez et la bouche.




Notre masque




## Préparation à l'utilisation :

Preparing for use / Vorbereitung zur Verwendung / Pose d'un masque / Подготовка к применению / Przygotowanie


1

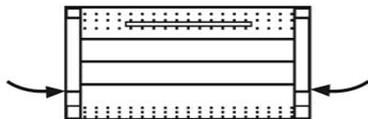

2

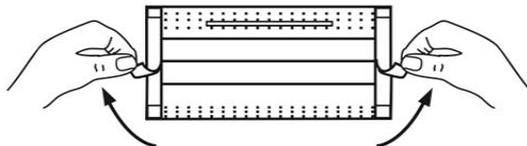

3

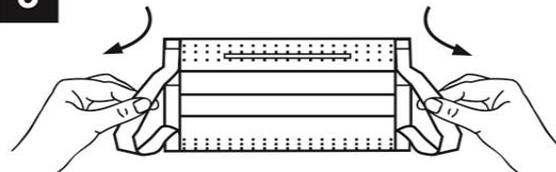

Nous prenons soin de votre  
sécurité



Pour plus d'informations contactez :

CHRISTIN Paul

tel. 07.87.95.90.28

Paul.christin@tzmo.fr