


ACCUVAC Lite

Simplement puissant – L'aspiration rendue facile

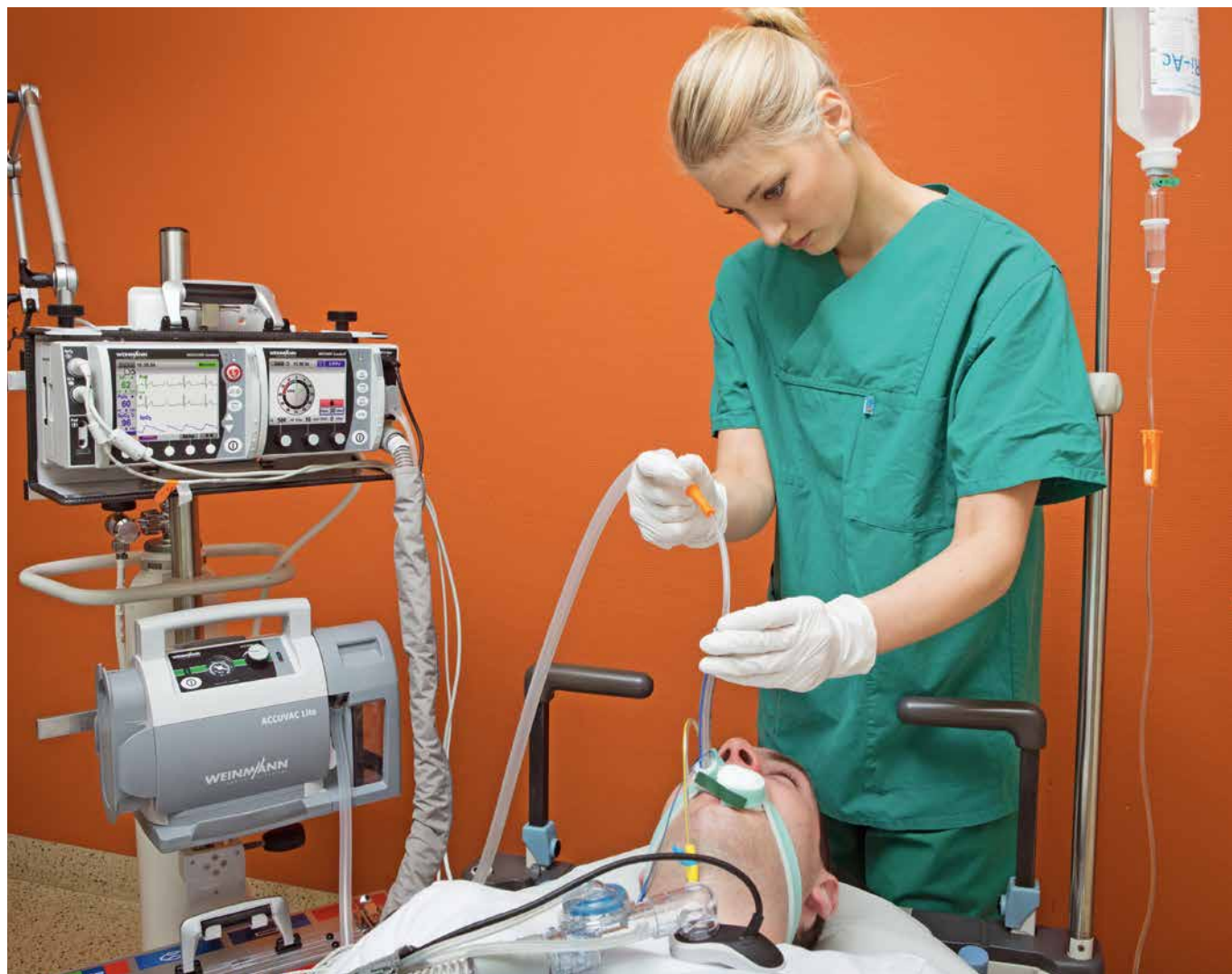



ACCUVAC Lite

Simplement puissant – L'aspiration rendue facile

Libérer les voies aériennes supérieures est la mesure immédiate à prendre pour sauver un patient en détresse. Depuis de nombreuses décennies, ACCUVAC est considéré comme la référence dans l'aspiration des mucosités. Lors de l'aspiration des sécrétions buccales et pharyngiennes ou lors de l'aspiration endotrachéale ou bronchique, ACCUVAC Lite libère efficacement les VAS. Sa grande puissance d'aspiration et sa simplicité d'utilisation garantissent un traitement rapide et efficace lors de l'intervention d'urgence ou à l'hôpital.

Large éventail d'interventions, manipulation flexible

La plage de dépression d'ACCUVAC Lite peut être réglée et ajustée grâce au régulateur de dépression à action progressive très simple d'utilisation. Il peut donc ainsi être utilisé aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant et le petit enfant. Outre l'aspiration des sécrétions au niveau des VAS, ACCUVAC Lite peut aussi être utilisé pour la dépression d'attelles et de matelas immobilisateurs.

Vos avantages en un coup d'oeil

- Très polyvalent
- Sûr et hygiénique
- Intuitif et robuste
- Transport sécurisé avec support mural dans tout véhicule médical, conforme à la norme EN 1789



Confort d'utilisation pour tous types d'interventions

- Grande puissance d'aspiration d'env. 26 l/min pour -0,8 bar (à l'entrée de l'appareil)
- Dépression réglable en continu grâce au régulateur de dépression à action progressive jusqu'à -0,8 bar
- Lecture aisée de la dépression sur le manomètre
- Récupération des sécrétions en toute sécurité grâce au bocal réutilisable autoclavable avec filtre antibactérien à usage unique et soupape de trop plein ou grâce à la poche d'aspiration à usage unique Serres® avec filtre antibactérien intégré
- Changement de la batterie : rapide et simple
- Boîtier robuste en matériaux résistants aux chocs
- Appareil ergonomique très stable



ACCUVAC Lite

avec système réutilisable, support mural, sac d'accessoires et câble de raccordement 12 V



ACCUVAC Lite

avec système à usage unique, support mural, câble de raccordement 12 V et sac de protection

Simplicité d'utilisation au quotidien

- Logement optimal du tube d'aspiration grâce à l'enrouleur latéral
- Déverrouillage rapide et facile d'une main de son support mural
- Compatible avec les supports muraux ACCUVAC existants
- En option avec grand sac d'accessoires, sac de protection et/ou sangle de transport

Pour tous les patients et en toute situation


- Aspiration des sécrétions et restes alimentaires
- Aspiration endotrachéale et bronchique
- Pour utilisation chez le petit enfant, l'enfant et l'adulte
- Dépression d'attelles et de matelas immobilisateurs

 SAV fabricant
+33 1 69 41 51 24

Entretien et services ACCUVAC Lite

Garantie du fabricant	2 ans
Intervalle CTS	sans CTS
Intervalle maintenance	sans maintenance
Contrôle de fonctionnement	manual
Changement de batterie	facile, de l'extérieur, sans outillage
Batterie	sans maintenance, sans étalonnage nécessaire
Conversion système à usage unique/ système réutilisable	simple, sans outillage

Utilisation intuitive, sécurité maximale

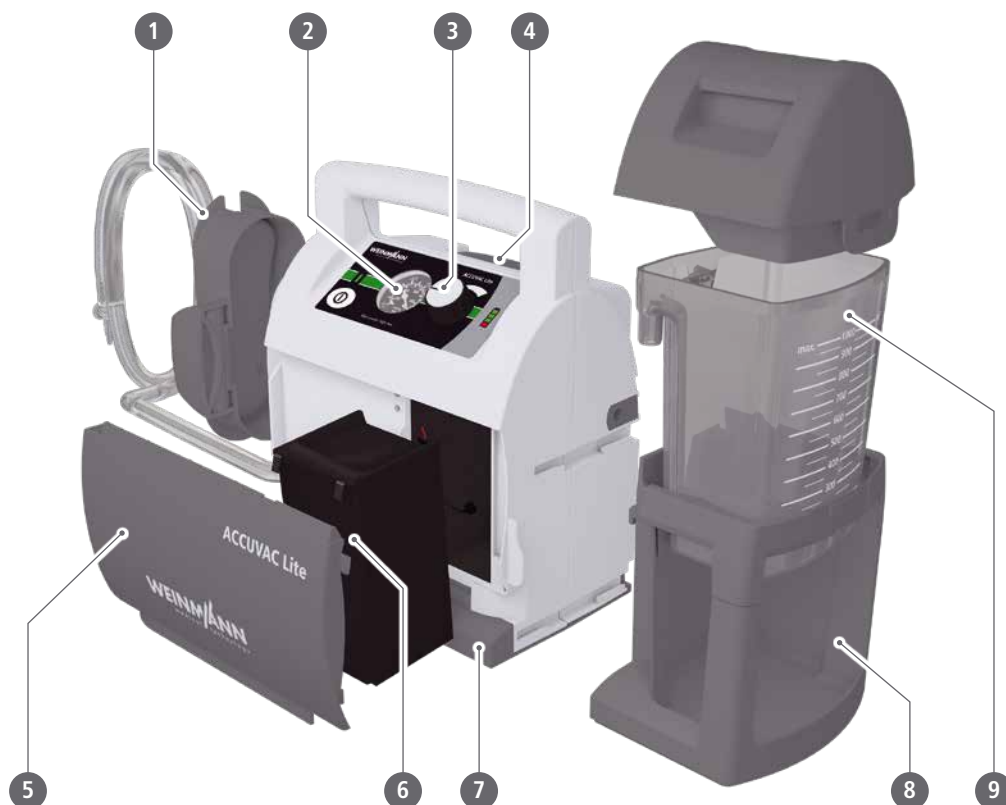

1. Support pour tube d'aspiration

Logement optimal du tube d'aspiration

2. Manomètre

Indicateur de dépression

3. Régulateur de dépression simple d'utilisation

Réglage en continu de la puissance d'aspiration

4. Déverrouillage du support mural

Touche de déverrouillage pour une prise en main rapide

5. Couvercle du logement batterie

Remplacement rapide de la batterie sans outillage

6. Batterie rechargeable

Batterie au plomb avec recharge rapide jusqu'à 80%

7. Pied de l'appareil avec conduit pour le passage du tube d'aspiration

8. Logement pour bocal à sécrétions

Matériau résistant aux chocs protège le bocal à sécrétions

9. Bocal réutilisable, 1000 ml

Avec protection contre les débordements et filtre antibactérien à usage unique. Quand le bocal réutilisable est plein, ACCUVAC Lite arrête l'aspiration.



Caractéristiques techniques

ACCUVAC Lite

Classe de produit selon 93/42/CEE	IIa	
Conformité RoHS selon la directive 2011/65/EU (RoHS II)	oui	
Classification selon EN ISO 10079-1	haut vide/haut débit	
Normes satisfaites	EN 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789, EN 60601-1-11, EN 60601-1-12, RTCA DO-160 G	
Dimensions (l x h x p)	- avec système de bocal 370 x 277 x 146 mm - avec système de bocal et sac d'accessoires 370 x 277 x 152 mm	
Poids	- appareil avec batterie/sans bocal ni logement 4,6 kg - bocal réutilisable avec logement 1,00 kg - bocal à usage unique avec logement 0,65 kg	
Températures limites: en fonctionnement	-5 °C à +50 °C	
Températures limites: transport/stockage	-40 °C à +70 °C	
Consommation électrique maximale	3,7 A	
Tension nominale	12 V DC nominal (min. 10 V, max. 15 V)	
Puissance d'aspiration à l'entrée de l'appareil (sans bocal) pour -0,8 bar, batterie rechargée et 21 °C/1013 hPa	26 l/min	
Puissance d'aspiration à l'entrée du bocal réutilisable pour -0,8 bar, batterie rechargée et 21 °C/1013 hPa	23 l/min	
Réglage de la dépression	via régulateur de dépression à action progressive	
Mode de fonctionnement	S2 45 min	
Degré de protection	IP34D	
Type de batterie	plomb	
Batterie	- durée de recharge état 80 % : 2 h 40 min - état 100 % : 14 h - durée de vie env. 400 cycles de recharge - autonomie de la batterie 45 min (pour fonctionnement ininterrompu avec batterie rechargée/neuve)	
Contenance du bocal à sécrétions	1 000 ml	
Tube d'aspiration réutilisable	Ø 10 mm, longueur 1300 mm	
Tube d'aspiration à usage unique	Ø 7 mm, longueur 1800 mm	

CE 0124

Certified Quality
Management System
meeting EC directive 93/42/EEC,
Annex II (EN ISO 9001:2008/EN ISO 13485)

Sous réserve de modifications
des spécifications.

 Designed in Germany

Constituez vous-même votre équipement ACCUVAC Lite en fonction de vos besoins spécifiques :



ACCUVAC Lite avec système à usage unique, WM 11705

ACCUVAC Lite avec système réutilisable*, WM 11700



ACCUVAC Lite avec système à usage unique, sac d'accessoires, WM 11745

ACCUVAC Lite avec système réutilisable*, sac d'accessoires, WM 11740

Complétez votre ACCUVAC Lite avec d'autres accessoires de la page 6

*Le système réutilisable est équipé d'un filtre antibactérien à usage unique.

Accessoires et Consommables

Accessoires

1. Sac de protection WM 11692
(non compatible avec le sac d'accessoires)
2. Sangle de transport WM 11693
3. Câble de raccordement 12 V WM 10650
4. Bloc d'alimentation/chargeur WM 2620
pour courant alternatif de 100 à 240 V sur
connecteur ACCUVAC, y compris câble d'alimentation
électrique selon EN 50075 (prise européenne)
5. Support mural pour ACCUVAC pour montage WM 15208
direct au mur y compris kit de montage
6. Plaque de fixation pour rail WM 15845
7. Kit de fixation rail mural médical WM 15805
avec 2 adaptateurs
8. Support mural pour bloc d'alimentation/chargeur WM 15844
9. Kit de fixation pour barre, Ø 19 mm - 40 mm WM 15806
10. Kit de conversion pour système réutilisable WM 17820
comprenant :
 - kit bocal réutilisable ACCUVAC Lite (WM 17821)
 - logement pour bocal réutilisable (WM 11654)
11. Kit de conversion pour système à usage unique WM 17825
comprenant :
 - logement pour bocal à usage unique (WM 11754)
 - tuyau à vide pour bocal Serres® (WM 11761)
 - bocal Serres®, complet (WM 10790)
12. Kit de conversion sac d'accessoires WM 17839
comprenant :
 - couvercle du logement batterie (WM 11714)
pour sac d'accessoires
 - sac d'accessoires (WM 11691)

Consommables

13. Poche d'aspiration Serres® WM 17800
de 1000 ml, avec filtre hydrophobe et agent
solidifiant (lot en carton de 32 unités)
14. Tube d'aspiration à usage unique avec WM 10778
prise d'air pour utilisation avec un système
à usage unique, 180 cm de long, Ø 7 mm,
aussi disponible en lots de 10, 20, 32 et 50
15. Tube d'aspiration réutilisable, WM 10662
130 cm de long, Ø 10 mm,
aussi disponible en lots de 10, 20 et 50
16. Prise d'air pour tube d'aspiration réutilisable, WM 10666
Ø 10 mm, aussi disponible en lots de
10, 20 et 50
17. Filtre antibactérien à usage unique pour WM 17830
bocal réutilisable, lot de 10
18. Lot de 10 filtres hygiéniques pour système WM 11634
à usage unique, ACCUVAC Pro/Lite





Pièces détachées pour système réutilisable

1. Support filtre	WM 11661
2. Joint torique pour support filtre	WM 11663
3. Filtre antibactérien à usage unique	
4. Flotteur à bille	WM 11662
5. Bocal réutilisable de 1000 ml	WM 11653
6. Tube d'aspiration réutilisable Ø 10 mm	WM 10662
7. Prise d'air pour tube d'aspiration réutilisable Ø 10 mm	WM 10666
8. Couvercle du bocal de sécrétions, complet comprenant les pièces détachées 1 à 5	WM 17822
9. Logement pour bocal réutilisable	WM 11654
Kit système réutilisable, comprenant les pièces détachées 5 à 8	WM 17821
Kit de conversion système réutilisable comprenant les pièces détachées 5 à 9	WM 17820

Pièces détachées pour système à usage unique Serres®

Bocal à sécrétions Serres®, complet comprenant :	WM 10790
• bocal à sécrétions, 1000 ml (WM 10775)	
• poche d'aspiration	
• tube d'aspiration à usage unique avec prise d'air (WM 10778)	
Bocal à sécrétions Serres®, 1000 ml	WM 10775
Tuyau à vide pour bocal à sécrétions Serres®	WM 11761
Logement pour bocal à usage unique	WM 11754
Kit bocal à sécrétions à usage unique comprenant :	WM 17826
• tuyau à vide pour bocal à sécrétions Serres® (WM 11761)	
• bocal à sécrétions Serres®, complet (WM 10790)	
Raccord coudé pour bocal Serres®, réutilisable	WM 10799

Pièces détachées pour ACCUVAC Lite

Kit touche de déverrouillage	WM 17837
Batterie au plomb	WM 10747
Couvercle du logement batterie (sans oeillets pour sac d'accessoires)	WM 11704
Support pour tube d'aspiration	WM 11664
Pied de l'appareil	WM 11677

Mentions légales

Produktname est un dispositif médical de classe IIa CE 93/42/CEE fabriqué par WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG et distribué par WEINMANN Emergency France SARL. ACCUVAC Lite n'est pas pris en charge par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement la notice avant toute utilisation. Ce document est destiné aux professionnels de santé. Référence du document : 83150 - FR - Juillet 2020

Simply professional

WEINMANN Emergency est une entreprise familiale de technologie médicale opérant au niveau international. Avec nos solutions système mobiles destinées à l'urgence, le transport et la médecine de catastrophe, nous sommes la référence quand il s'agit de sauver des vies. En contact étroit avec les professionnels secouristes, hospitaliers et militaires, nous développons des dispositifs médicaux innovants pour la ventilation et la défibrillation. Depuis plus de 100 ans, nos clients savent que WEINMANN Emergency est synonyme de fiabilité, d'expérience et de qualité made in Germany.

Siège social

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösestraße 12
22525 Hamburg
Germany

Central

T: +49 40 88 18 96-0
F: +49 40 88 18 96-480
E: info@weinmann-emt.de

Service clients

T: +49 40 88 18 96-120

Service après-vente

T: +49 40 88 18 96-122

Centre de production, de logistique et de service après-vente

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Siebenstücken 14 • 24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

Chine

Weinmann (Shanghai) Medical Device Trading Co. Ltd.
T: +86 21 52 30 22 25 • info@weinmann-emt.cn

É.A.U. (Branch)

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co.KG
T: +971 432 100 31 • info-dubai@weinmann-emt.com

France

WEINMANN Emergency France SARL – Paris – Les Ulis
T: +33 1 69 41 51 20 • info@weinmann-emt.fr

Russie

Weinmann SPb GmbH – St. Petersburg
T: +7 812 633 30 82 • info@weinmann-emt.ru

Singapour

Weinmann Singapur PTE, Ltd.
T: +65 65 09 44 30 • info-singapore@weinmann-emt.sg

Espagne

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG
T: +34 91 79 01 137 • info-spain@weinmann-emt.es

USA

Weinmann Emergency LP
T: +1 770-274-2417 • info@weinmann-emergency.com