

ACCUVAC Pro

L'expérience est essentielle – Répond à toutes vos aspirations





ACCUVAC Pro

L'expérience est essentielle – Répond à toutes vos aspirations

Libérer les voies aériennes supérieures est la première mesure vitale à effectuer quand il y a une obstruction dans les voies respiratoires pour pouvoir ensuite ventiler le patient de manière efficace. Dans les situations d'urgence, la libération des voies aériennes est essentielle pour la survie. Lors de l'aspiration des sécrétions buccales et pharyngiennes ou lors de l'aspiration endotrachéale ou bronchique, ACCUVAC Pro libère rapidement les VAS. Sa grande puissance d'aspiration et sa simplicité d'utilisation permettent d'effectuer une mesure efficace et déjà éprouvée lors de l'intervention d'urgence professionnelle. Sa grande puissance d'aspiration et sa simplicité d'utilisation permettent d'effectuer une mesure efficace et déjà éprouvée lors de l'intervention d'urgence professionnelle.

Large éventail d'interventions, manipulation flexible

Les quatre niveaux d'aspiration prédéfinis permettent à l'utilisateur d'adapter la puissance d'aspiration de manière optimale. ACCUVAC Pro peut donc ainsi être utilisé aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant et le petit enfant. Outre l'aspiration des sécrétions au niveau des VAS, ACCUVAC Pro peut aussi être utilisé pour la dépression d'attelles et de matelas immobilisateurs.

Vos avantages en un coup d'oeil

- Très polyvalent
- Sûr et hygiénique
- Simple d'utilisation et robuste
- Conforme à la norme EN 1789, autorisé en vol selon RTCA DO-160G



Confort d'utilisation, pour tous types d'interventions

- Grande puissance d'aspiration d'env. 34 l/min pour -0,8 bar (à l'entrée de l'appareil)
- Changement de la batterie : rapide et simple
- Batterie lithium-ion de dernière génération d'une autonomie de plus de 60 minutes
- Quatre niveaux d'aspiration prédéfinis
- Contrôle de fonctionnement automatique avec alarmes visuelles et sonores en cas de défaut
- Récupération des sécrétions en toute sécurité grâce au bocal réutilisable autoclavable avec filtre antibactérien à usage unique et soupape de trop plein ou grâce à la poche d'aspiration à usage unique Serres® avec filtre antibactérien intégré
- Boîtier robuste en matériaux résistants aux chocs
- Appareil ergonomique très stable

Simplicité d'utilisation au quotidien

- Logement optimal du tube d'aspiration grâce au support latéral
- Déverrouillage rapide et facile d'une main de son support mural
- Compatible avec les supports muraux ACCUVAC existants
- En option avec grand sac d'accessoires, sac de protection et/ou sangle de transport

Pour tous les patients et en toute situation

- Aspiration des sécrétions et restes alimentaires
- Aspiration endotrachéale et bronchique
- Particulièrement approprié en préhospitalier
- Dépression d'attelles et de matelas immobilisateurs
- Pour utilisation chez le petit enfant, l'enfant et l'adulte

Sécurité et fiabilité jour après jour

Si l'appareil est en dérangement, une prise USB sur ACCUVAC Pro vous permet de télécharger les fichiers d'erreurs et de les envoyer directement à notre service technique à Igny près de Paris.




SAV fabricant
+33 1 694151-24

Notre service technique pourra ainsi vous conseiller par téléassistance sur la marche à suivre. N'hésitez pas à contacter WEINMANN Emergency France pour bénéficier du SERVICE MOBILE.

Entretien et services ACCUVAC Pro

Garantie du fabricant	2 ans
Intervalle CTS	sans CTS
Intervalle maintenance	sans maintenance
Contrôle de fonctionnement	automatique
Durée du contrôle de fonctionnement	max. 15 secondes
Changement de batterie	facile, de l'extérieur, sans outillage
Batterie	sans maintenance, sans étalonnage nécessaire
Protection décharge profonde de la batterie	✓
Polarisation et limiteur de pression	✓
Conversion système à usage unique / système réutilisable	simple, sans outillage
Mise à jour logicielle possible par	exploitant/utilisateur
Téléassistance en cas d'appareil défectueux	✓

Utilisation intuitive, sécurité maximale

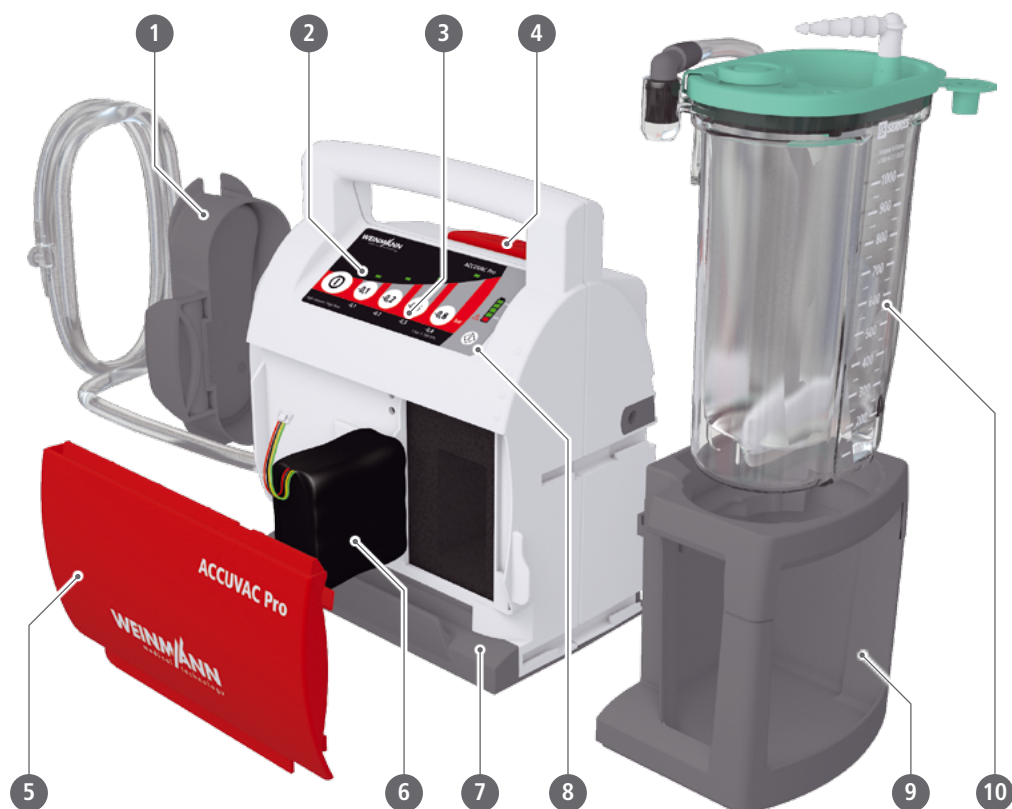

1. Support pour tube d'aspiration

Logement optimal du tube d'aspiration

2. Quatre niveaux d'aspiration prédéfinis

Sélection rapide par simple pression d'une touche

3. Rétroéclairage

Niveau d'aspiration sélectionné bien visible même en plein soleil

4. Déverrouillage du support mural

Touche de déverrouillage pour une prise en main rapide

5. Couvercle du logement batterie

Remplacement rapide de la batterie sans outillage

6. Batterie

Batterie lithium-ion moderne à recharge rapide d'une grande autonomie

7. Pied de l'appareil avec conduit pour le passage du tube d'aspiration

8. Contrôle de fonctionnement automatique

Avec réaction visuelle et sonore rapide

9. Logement pour bocal à sécrétions

Matériau résistant aux chocs protège le bocal à sécrétions

10. Bocal à sécrétions Serres®, 1000 ml

Avec poche d'aspiration à usage unique, filtre antibactérien intégré et agent solidifiant. Quand la poche est pleine, ACCUVAC Pro s'arrête automatiquement.



ACCUVAC Pro

Classe de produit selon 93/42/CEE	Ila
Conformité RoHS selon la directive 2011/65/EU (RoHS II)	oui
Classification selon EN ISO 10079-1	haut vide/débit haut
Normes satisfaites	EN 1789, RTCA DO-160 G, EN 60601-1, EN 60601-1-11, EN 60601-1-12, EN ISO 10079-1
Dimensions (l x h x p)	- avec système de bocal 370 x 277 x 146 mm - avec système de bocal et sac d'accessoires 370 x 277 x 152 mm
Poids	- appareil avec batterie/sans bocal ni logement 3,65 kg - bocal réutilisable avec logement 1,00 kg - bocal à usage unique avec logement 0,65 kg
Températures limites: en fonctionnement	-5 °C à +50 °C
Températures limites: transport/stockage	-40 °C à +70 °C
Consommation électrique maximale	3,8 A
Tension nominale	12 V DC nominal (min. 10 V, max. 15 V)
Puissance d'aspiration à l'entrée de l'appareil (sans bocal) pour -0,8 bar, batterie rechargée et 21 °C/1013 hPa	34 l
Puissance d'aspiration à l'entrée du bocal réutilisable pour -0,8 bar, batterie rechargée et 21 °C/1013 hPa	30 l/min
Réglage de la dépression	via niveaux prédéfinis : -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar et -0,8 bar, réglage électronique
Mode de fonctionnement	S2 60 min
Degré de protection	IP34D
Type de batterie	Li-Ion
Batterie	- durée de recharge état 80 % : 2 h 40 (pour 20 °C sans fonctionnement) - durée de recharge état 100% : env. 4 h - durée de vie 500 cycles de recharge - autonomie de la batterie 60 min (pour fonctionnement ininterrompu avec batterie rechargée/neuve)
Contenance du bocal à sécrétions	1000 ml
Tuyau d'aspiration réutilisable	Ø 10 mm, longueur 1 300 mm
Tuyau d'aspiration à usage unique	Ø 7 mm, longueur 1 800 mm

CE 0124

Système QM certifié
conf. à la directive de la
CE 93/42/CEE, annexe II
(EN ISO 9001:2008/EN ISO 13485)

Sous réserve de modifications
des spécifications.

Designed in Germany

Constituez vous-même votre équipement
ACCUVAC Pro en fonction de vos besoins spécifiques :



**ACCUVAC Pro avec système
à usage unique,
WM 11605**

**ACCUVAC Pro avec système
réutilisable*,
WM 11600**



**ACCUVAC Pro avec
système à usage unique,
sac d'accessoires,
WM 11645**

**ACCUVAC Pro avec
système réutilisable*,
sac d'accessoires,
WM 11640**

Complétez votre ACCUVAC Lite avec d'autres accessoires de la page 6

*Le système réutilisable est équipé d'un filtre antibactérien à usage unique.

Accessoires et Consommables

Accessoires

1. Sac de protection WM 11692
(non compatible avec le sac d'accessoires)
2. Sangle de transport WM 11693
3. Câble de raccordement 12 V WM 10650
4. Bloc d'alimentation/chargeur WM 2620
pour courant alternatif de 100 à 240 V sur
connecteur ACCUVAC, y compris câble d'alimentation
électrique selon EN 50075 (prise européenne)
5. Support mural pour ACCUVAC pour montage WM 15208
direct au mur y compris kit de montage
6. Plaque de fixation pour rail WM 15845
7. Kit de fixation rail mural médical WM 15805
avec 2 adaptateurs
8. Support mural pour bloc d'alimentation/chargeur WM 15844
9. Kit de fixation pour barre, Ø 19 mm - 40 mm WM 15806
10. Kit de conversion pour système réutilisable WM 17820
comprenant :
- kit bocal réutilisable (WM 17821)
- logement pour bocal réutilisable (WM 11654)
11. Kit de conversion pour système à usage unique WM 17825
comprenant :
- logement pour bocal à usage unique (WM 11754)
- tuyau à vide pour bocal Serres® (WM 11761)
- bocal Serres®, complet (WM 10790)
12. Kit de conversion sac d'accessoires WM 17829
comprenant :
- couvercle du logement batterie
pour sac d'accessoires (WM 11614)
- sac d'accessoires (WM 11691)

Consommables

13. Poche d'aspiration Serres® WM 17800
de 1000 ml, avec filtre hydrophobe et agent
solidifiant (lot en carton de 32 unités)
14. Tube d'aspiration à usage unique avec WM 10778
prise d'air pour utilisation avec un système
à usage unique, 180 cm de long, Ø 7 mm,
aussi disponible en lots de 10, 20, 32 et 50
15. Tube d'aspiration réutilisable, WM 10662
130 cm de long, Ø 10 mm,
aussi disponible en lots de 10, 20 et 50
16. Prise d'air pour tube d'aspiration réutilisable, WM 10666
Ø 10 mm, aussi disponible en lots de
10, 20 et 50
17. Filtre antibactérien à usage unique pour WM 17830
bocal réutilisable, lot de 10





Pièces détachées pour système réutilisable

1. Partie supérieure du couvercle du bocal	WM 11657
2. Support filtre	WM 11661
3. Joint torique pour support filtre	WM 11663
4. Filtre antibactérien à usage unique	
5. Partie inférieure du couvercle du bocal	WM 11658
6. Flotteur à bille	WM 11662
7. Bocal réutilisable de 1000 ml	WM 11653
8. Tube d'aspiration réutilisable Ø 10 mm	WM 10662
9. Prise d'air pour tube d'aspiration réutilisable Ø 10 mm	WM 10666
10. Logement pour bocal réutilisable	WM 11654
Couvercle du bocal, complet comprenant les pièces détachées 1 à 6	WM 17822
Kit système réutilisable, comprenant les pièces détachées 1 à 9	WM 17821
Kit de conversion système réutilisable comprenant les pièces détachées 1 à 10	WM 17820

Pièces détachées pour système à usage unique Serres®

Bocal à sécrétions Serres®, complet comprenant :	WM 10790
• bocal à sécrétions, 1000 ml (WM 10775)	
• poche d'aspiration	
• tube d'aspiration à usage unique avec prise d'air (WM 10778)	
Bocal à sécrétions Serres®, 1000 ml	WM 10775
Tuyau à vide pour bocal à sécrétions Serres®	WM 11761
Logement pour bocal à usage unique	WM 11754
Kit bocal à sécrétions à usage unique comprenant :	WM 17826
• tuyau à vide pour bocal à sécrétions Serres® (WM 11761)	
• bocal à sécrétions Serres®, complet (WM 10790)	
Raccord coudé pour bocal Serres®, réutilisable	WM 10799

Pièces détachées pour ACCUVAC Pro

Kit touche de déverrouillage	WM 17837
Batterie lithium-ion	WM 11603
Couvercle du logement batterie (sans oeillets pour sac d'accessoires)	WM 11604
Support pour tube d'aspiration	WM 11664
Pied de l'appareil	WM 11677

Mentions légales

ACCUVAC Pro est un dispositif médical de classe IIb CE 93/42/CEE distribué par WEINMANN Emergency France SARL. ACCUVAC Pro n'est pas pris en charge par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement la notice avant toute utilisation. Ce document est destiné aux professionnels de santé. Référence du document : 83510 - FR - Mai 2017

Simplement professionnel

WEINMANN Emergency est une entreprise familiale de technologie médicale opérant au niveau international. Avec nos solutions système mobiles destinées à l'urgence, le transport et la médecine de catastrophe, nous sommes la référence quand il s'agit de sauver des vies. En contact étroit avec les professionnels secouristes, hospitaliers et militaires, nous développons des dispositifs médicaux innovants pour la ventilation et la défibrillation. Depuis plus de 100 ans, nos clients savent que WEINMANN Emergency est synonyme de fiabilité, d'expérience et de qualité made in Germany.

Siège social

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösesstraße 12
22525 Hamburg
Germany

T: +49 40 88 18 96-0
F: +49 40 88 18 96-480
T: +49 40 88 18 96-120 Service clients
T: +49 40 88 18 96-122 Service après-vente
E: info@weinmann-emt.de

Centre de production, de logistique et de service après-vente

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Siebenstücken 14
24558 Henstedt-Ulzburg • Germany

Chine

Weinmann (Shanghai) Medical Device Trading Co. Ltd.
T: +86 21 52 30 22 25 • info@weinmann-emt.cn

É.A.U.

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co.KG (Branch)
info-dubai@weinmann-emt.com

France

WEINMANN Emergency France SARL – Paris-Igny
T: +33 1 69 41 51 20 • info@weinmann-emt.fr

Russie

Weinmann SPb GmbH – St. Petersburg
T: +7 812 633 30 82 • info@weinmann-emt.ru

Singapour

Weinmann Singapur PTE, Ltd.
T: +65 65 09 44 30 • info-singapore@weinmann-emt.sg

Espagne

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG
T: +34 91 79 01 137 • info-spain@weinmann-emt.es